

## Návod na použití Vulkan Pak

### Ohřívání v troubě:

Vulkan Pak je možno ohřívát v běžné domácí troubě (elektrické nebo plynové). Podle potřeby zvolte teplotu mezi 70-100 stupni C. Po dosažení patřičné teploty vložte Vulkan Pak do prostředku trouby na mřížku a nechte 20-40 minut prohřát.

### Ohřívání v mikrovlnné troubě:

Díky minerálnímu složení Vulkan Paku jej můžeme ohřívát i v mikrovlnné troubě s minimální dobou ohřívání a okamžitou účinností plně prohřátého zábalu.

Doba ohřívání (norm. údaje - 600 W mikrovlnná trouba):

VULKAN PAK velikost 1 (30x20 cm): přibližně 3-4 min.

VULKAN PAK velikost 2 (40x30 cm): přibližně 4-5 min.

Podle těchto údajů má ohřátý obklad provozní teplotu asi 80 stupňů C. Pokud budete chtít použít obklad Vulkan Pak asi po 15 min. použití, potom stačí k prohřátí na teplotu asi 80 stupňů C u velikosti 1 pouze 1 min. (2 min u velikosti 2). Ohřev v mikrovlnné troubě působí současně jako desinfekce škodlivých zárodků.

### Pozor!

Při použití mikrovlnné trouby se nesmí obklad pokládat přímo na kovovou mřížku. Taktéž je třeba bezpodmínečně zajistit volné otáčení Vulkan Paku v prostoru mikrovlnné trouby. Při dotyku obalu Vulkan Paku o stěny trouby může dojít k propálení textilního obalu! Je třeba zajistit přizemnění trouby!

### Pokyny k výrobku:

VULKAN PAK je stálý do teploty 150 stupňů C.

Polštářek se může prát v ruce (používat jemný prací prostředek). Po vyprání nechat vysušit v troubě nebo v ohřívacím boxu při teplotě asi 60 stupňů C.

Nikdy neskladovat ve vlhku!

Pokud je ošetřován pacient s pokožkou citlivou na vysokou teplotu, může být polštářek před přiložením na tělo zabalen do ručníku. Tím působíme na postiženou tělesnou partii tepelným zářením pouze v oslabené formě.

Pozor na ostré předměty, aby nedošlo k poškození obalu! Při nevhodném použití například při přehřátí přes 150 stupňů C, nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Vyrábí Pharma Präp. GmbH-Freudenstadt/Germany/