


## Návod Elektrický čistič uší

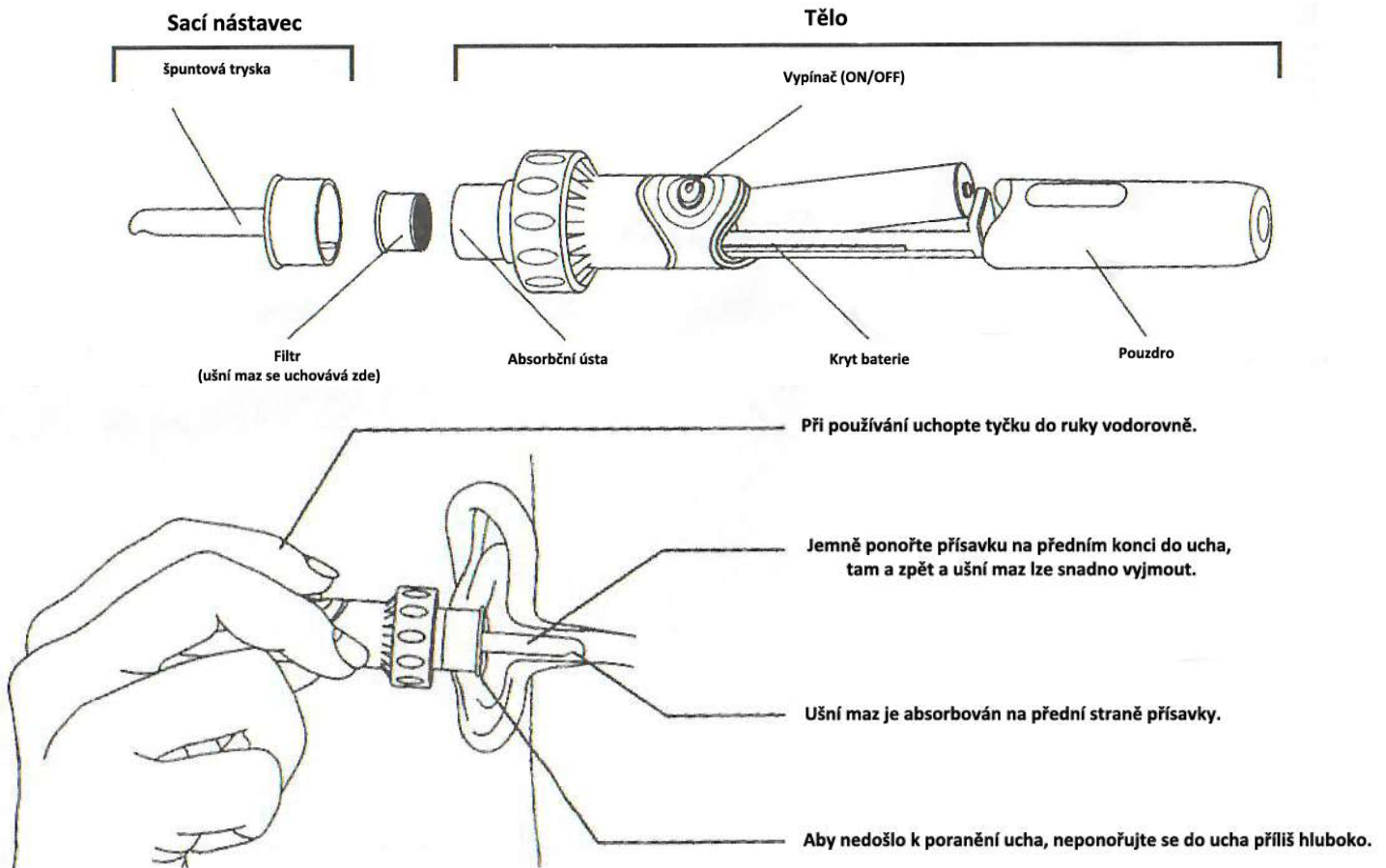

Při použití se nedotýkejte jiných osob ani předmětů, sedněte si na bezpečné místo.

Pokud je používají děti, používejte prosím opatrovníka.

Chcete-li vyčistit mokré ušní maz, zkontrolujte, zda je přísavka a filtr blokováni.




Ušní bubínek je zraněn, nepoužívejte prosím výrobek.

Pokud je ucho bolestivé nebo máte jiné zranění, použijte ho po konzultaci s lékařem.

Nepoužívejte jej, s výjimkou účelu zde uvedeného, jinak může dojít k selhání zařízení.

### Jak používat:

1. Vytáhněte vnější kryt svisle dolů. (viz obrázek 1).
2. Vložte baterie do držáku baterií hlavního těla. Vložte baterie podle správného směru elektrod. (obrázek 2).
3. Nasadte kryt na místo.
4. Nasadte přísavku na hlavní tělo (obrázek 3).
5. Zapněte spínač. (klikněte a podržte spínač, pokud spínač není zcela přidržen, je zdroj napájení okamžitě vypnut)
6. Ušní maz přilnutý k uchu se může snadno vibracemi uvolnit a být nasávan do přísavky na předním konci. Přední strana přísavky se vodorovně vloží do ucha a pomalu se ovládá.

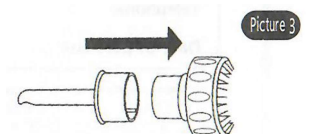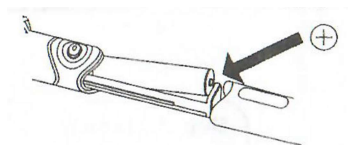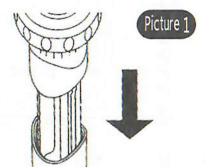

### Čištění a údržba

Filtr lze oddělit a omýt vodou stejně jako přísavka.

V některých případech je obtížné filtr vyjmout.

Veďte prosím na vědomí, že ostatní části kromě filtru a přísavky nesmí být umývány vodou.